

Medline  
Lipiec 2010

### Zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa w użytkowaniu defibrylatora ddu-100 serii AED

Szanowny użytkowniku,

Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, dystrybutor firmy Defibtech w Polsce, uprzejmie zawiadamia, iż dobrowolnie przeprowadza korektę baterii DBP-2800 wyprodukowanych przed 04.06.2007.


**Korekta dotyczy tylko zestawów baterii DBP-2800 wyprodukowanych przed 04.06.2007.**

W rzadkich przypadkach, kiedy defibrylator AED jest używany z wadliwym zestawem baterii, może on wykryć błędną kondycję, anulować ładowanie i nie przeprowadzić terapii. Chociaż prawdopodobieństwo zajścia takiej sytuacji jest bardzo niewielkie, jako środek ostrożności, skorygujemy potencjalnie wadliwe baterie poprzez wprowadzenie oprogramowania do zmiany parametrów w baterii.

Nasza dokumentacja wskazuje, że mogą być Państwo w posiadaniu jednego z zestawów, z identyfikatorem DBP-2800 objętych korektą.

Aby potwierdzić czy są Państwo w posiadaniu wadliwego zestawu baterii prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Wyjmij zestaw baterii z DDU-100 AED i przyglądnij się etykietce. Jak zilustrowano poniżej etykieta określa model baterii (MODEL NUMBER) oraz dziewięćcyfrowy numer seryjny baterii (SERIAL NUMBER).

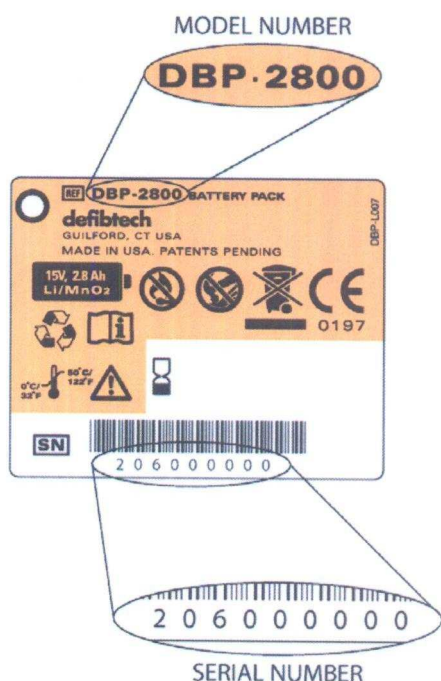

2. Jeżeli modelem twojej baterii jest DBP-2800 oraz jeden z poniżej podanych numerów seryjnych prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym.

206009408
206009416
206009427
206009429
206009432
206009434
206009448
206009452
206009552
206009559

**DZIAŁ TECHNICZNY**

mgr inż. Ewa Espenner-Dominik

**SERWIS MEDLINE**

tel : + 48 68 324 13 62

fax : + 48 68 324 13 62

[e.espenner-dominik@medline.pl](mailto:e.espenner-dominik@medline.pl)[serwis@medline.pl](mailto:serwis@medline.pl)

W międzyczasie, zalecane jest użytkowanie defibrylatora AED zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli podczas wykonywania czynności ratowniczych, AED anuluje wstrząs i wyłączy się ukazując kod: service kod 1003, zalecamy wymianę baterii i kontynuację czynności ratunkowych.

Medline przekazał poniższą informację do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Z poważaniem

Natalia Przybylska

Business Development Manager

Medline Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17,

65-410 Zielona Góra,

Poland